

# LinfoVir<sup>®</sup> plus

gocce nasali

---

## INFORMAZIONI PER IL CONSUMATORE

---

LinfoVir<sup>®</sup> Plus gocce nasali è un dispositivo medico contenente Resveratrolo da *Polygonum cuspidatum* e carbossimetilbeta-glucano in soluzione salina tamponata. Il prodotto, attraverso un utilizzo topico nasale, può risultare utile in quei soggetti che manifestano un'elevata tendenza ad infiammazioni e/o infezioni delle cavità nasali.

### INDICAZIONI

Dispositivo medico utile per favorire la fluidificazione delle secrezioni nasali e conseguentemente la loro rimozione, favorendo così la respirazione. Coadiuvante nel trattamento delle forme infiammatorie delle cavità nasali.

### COMPOSIZIONE

Acqua depurata, carbossimetilbeta-glucano, *Polygonum cuspidatum* rizoma titolato al 98% in resveratrolo, potassio fosfato bibasico, mannitolo, glicole propilenico, sodio cloruro, potassio fosfato, nipagina sodica.

### MODO D'USO

2-3 gocce per narice 3 o 4 volte al giorno. Al primo utilizzo del prodotto, evitare completamente il tappo del flaconcino in senso orario sino a fine corsa, in modo che la polvere contenuta nel tappo cada nel liquido.

Agitare energicamente e sostituire il tappo con l'apposito contagocce contenuto nella confezione avvitandolo a fondo.



Instillare nelle narici. Agitare prima di ogni utilizzo. La presenza di Resveratrolo (estratto dalla pianta *Polygonum cuspidatum*) può determinare una colorazione leggermente ambrata del prodotto senza comprometterne la qualità.

## AVVERTENZE

**Non usare in caso di ipersensibilità nota verso i componenti del prodotto.** In caso di reazioni avverse sospendere l'uso del prodotto e consultare il medico. Richiudere bene il dispositivo dopo l'uso. Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata. Il prodotto ricostituito è stabile per 30 giorni. Utilizzare il prodotto ricostituito entro 30 giorni.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. L'uso del flaconcino è strettamente personale. Per donne in gravidanza o in allattamento si raccomanda di sentire il parere del medico.

## EFFETTI INDESIDERATI

Non sono noti effetti indesiderati.

## CONFEZIONE

Flacone da 20 ml con tappo dosatore e contagocce.

Ultima revisione delle istruzioni per l'uso: Maggio 2021



Via Campello sul Clitunno 34 - 00181 Roma  
[www.noosit.com](http://www.noosit.com)



### 1 Inquadra con lo smartphone il QR Code



### 2 Scopri l'intera linea di prodotti Nóos



IMMUNITARIO



RESPIRATORIO



GASTROINTESTINALE



CAVO ORALE



UDITIVO

