

InfoVir® isowash

INFORMAZIONI PER IL CONSUMATORE

InfoVir® isowash è un dispositivo medico a base di soluzione salina isotonica, costituito da un sistema meccanico appositamente studiato per liberare ed igienizzare la cavità rinofaringea attraverso le narici.

INDICAZIONI

InfoVir® isowash è una soluzione salina isotonica utile nell'igiene quotidiana del rinofaringe. Genera un'onda igienizzante in grado di pulire a fondo rispettando la fisiologia della mucosa nasale e mantenendo il corretto stato di idratazione.


COMPOSIZIONE

Acqua depurata, potassio fosfato monobasico, potassio fosfato bibasico, sodio cloruro. Senza conservanti.

COME FUNZIONA

Il suo speciale terminale nasale consente la completa chiusura della narice producendo, alla pressione del soffietto, un'onda igienizzante in grado di raggiungere il rinofaringe e, attivando il riflesso palatale, uscire dalla narice controlaterale.

MODO D'USO

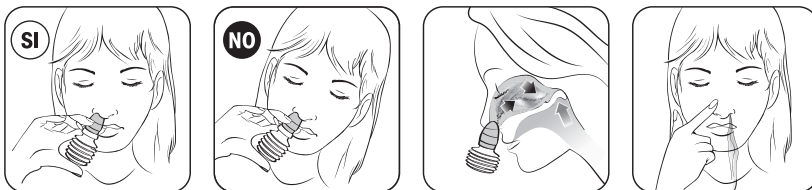

1. Prima di utilizzare il prodotto soffiare bene il naso.
2. Aprire un flacone e versare circa una metà del suo contenuto nel soffietto erogatore. Richiudere quindi il soffietto con il terminale nasale blu, spingendolo a fondo fino a farlo arrivare a contatto con la base della ghiera.
3. Appoggiare l'erogatore alla narice avendo cura di creare una perfetta aderenza che ne consenta la totale chiusura.
4. Premere fino in fondo il soffietto per erogare il prodotto.
5. Utilizzare la seconda metà della soluzione salina per effettuare il lavaggio attraverso l'altra narice.

COME E QUANDO USARLO

Utilizzare il prodotto una volta al giorno o su consiglio del medico. Il singolo flacone monodose contiene una quantità di soluzione sufficiente per un lavaggio completo da entrambe le narici. Se si ritiene opportuno, tenere tra le mani il soffietto riscaldando leggermente la soluzione prima dell'erogazione.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo da fonti di calore. Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro correttamente conservato.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Per l'uso del prodotto nei bambini al di sotto dei 2 anni chiedere il parere del medico. Non utilizzare in pazienti con traumi alle orecchie. Non utilizzare in caso di accertata sensibilità verso i componenti della soluzione. L'uso dell'erogatore è strettamente personale. Utilizzare la soluzione solo per il trattamento delle vie aeree superiori; utilizzare l'erogatore solo con la soluzione in dotazione. Non iniettabile.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 erogatore a soffietto
- 1 terminale nasale blu morbido adattabile a tutte le narici
- 8 flaconi monodose di LinfoVir® isowash soluzione salina isotonica

Ultima revisione delle istruzioni per l'uso: Maggio 2021



Via Campello sul Clitunno, 34 - 00181 Roma
www.noosit.com



Verifica le disposizioni del tuo Comune

1 Inquadra con lo smartphone il QR Code



2 Scopri l'intera linea di prodotti Nóos



IMMUNITARIO



RESPIRATORIO



GASTROINTESTINALE



CAVO ORALE



UDITIVO