

InfoVir®ofta

INFORMAZIONI PER IL CONSUMATORE

Morbida salvietta sterile monouso imbibita di soluzione isotonica, a base acquosa, di ingredienti attivi selezionati per la loro comprovata efficacia. Idonea all' utilizzo quotidiano.

INDICAZIONI

- Detersione, idratazione e decongestione delle palpebre interne ed esterne e dell' area perioculare.
- Ipersensibilità oculare indotta da fattori ambientali quali polveri, smog, pollini o da un' esposizione prolungata a schermi video. Contrasta gli arrossamenti, la lacrimazione ed il prurito.
- Riduzione del senso di secchezza e la sensazione di corpi estranei negli occhi.
- Coadiuvante in caso di patologie oculari di tipo allergenico o infettivo (congiuntiviti, blefariti, orzaiolo, calazio), di problematiche associate a disturbi della tiroide, infezioni di diversa natura, implicazioni oftalmologiche associate a patologie quali diabete e carenza di vitamine A, B, PP in associazione alla terapia indicata dall' oculista.
- Detergente ed idratante prima e dopo interventi di chirurgia oftalmica.
- Detergente e disarrossante per portatori di lenti a contatto.

COMPOSIZIONE


Sodium hyaluronate, Chamomilla recutita extract, Helichrysum italicum extract, Polisorbate 20, Lauryl glucoside, Linoleamidopropyl pg-Dimonium Chloride Phosphate.

- **Acido ialuronico (Sodium Hyaluronate)**: ha proprietà idratanti, umettanti e distensive.
- **Linoleamidopropyl pg-Dimonium Chloride Phosphate (fosfolipide)**: ha capacità detergente.
- **Chamomilla recutita**: ha proprietà lenitive, decongestionanti e rinfrescanti, nonché antinfiammatorie, disarrossanti ed antipruriginose.
- **Helichrysum italicum**: ha proprietà antinfiammatorie/antiossidanti (azione fotoprotettiva contro i raggi UV) e decongestionanti.

MODO D'USO

Automedicazione: aprire la bustina utilizzando l' apertura facilitata. Estrarre la salvietta e passarla più volte, delicatamente, all' interno della palpebra e sull' area perioculare. Utilizzare una salvietta per ciascun occhio e sostituirla dopo aver deterso un' area infetta, onde evitare la contaminazione di altre aree.

Non risciacquare e non asciugare l' area interessata.

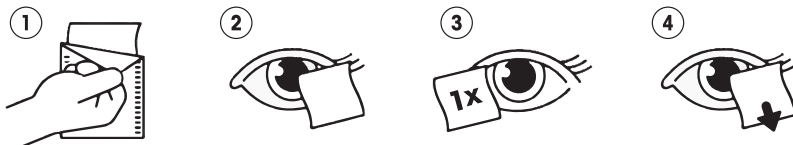

Utilizzo professionale: L' apertura facilitata della bustina è disegnata per utilizzo in campo sterile. Estrarre la salvietta e passarla più volte, delicatamente, all' interno della palpebra e sull' area perioculare. Utilizzare una salvietta per ciascun occhio e sostituirla dopo aver deterso un' area infetta, onde evitare la contaminazione di altre aree.

Non risciacquare e non asciugare l' area interessata.

AVVERTENZE

Nei bambini si raccomanda l'uso prettamente esterno per la pulizia delle ciglia e della zona perioculare ad occhio chiuso.

Tollerabilità tissutale e biocompatibilità:

- LinfoVir® Offa non brucia e non provoca dolore
- LinfoVir® Offa non è irritante e sensibilizzante
- LinfoVir® Offa è compatibile con le altre medicazioni oftalmiche

ISTRUZIONI DI SICUREZZA GENERALE ED AVVERTENZE

Il prodotto, sterile, è idoneo alla pulizia dell'interno della palpebra e dell'area peri-oculare. Operare con particolare delicatezza nel caso in cui si usi il dispositivo all'interno della palpebra. Utilizzare solo confezioni integre e non danneggiate. Conservare in luogo fresco ed asciutto. Tenere lontano da fonti di calore dirette e/o da raggi solari diretti. Utilizzare solo entro il periodo di validità, prestando attenzione alla data di scadenza.

Rev: Gennaio 2021



 Welfare Industries S.p.A.
Via dei Falegnami, 7 - 05018 Orvieto (TR), Italia
www.welfareindustries.com



Distribuito da:

 **NÓOS** Via Campello sul Clitunno, 34 - 00181 Roma
www.noosif.com

1 Inquadra con lo smartphone il QR Code



2 Scopri l'intera linea di prodotti Nóos



IMMUNITARIO



RESPIRATORIO



GASTROINTESTINALE



CAVO ORALE



UDITIVO