



## INFORMAZIONI PER IL CONSUMATORE

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Conservare questo foglio illustrativo perché potrebbe rendersi necessario leggerlo di nuovo. L'uso del prodotto è strettamente personale, LinfoVir® Oto Cerume gocce auricolari non deve essere condiviso con altre persone. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o in caso di dubbio rivolgetevi al medico o al farmacista.

### **Cos'è LinfoVir® Oto Cerume gocce auricolari e a che cosa serve**

LinfoVir® Oto Cerume gocce auricolari è stato scientificamente formulato per rimuovere gli accumuli di cerume dal condotto uditivo esterno e/o per prevenirne l'eccessivo compattamento.

Viene fornito in un flacone contagocce da 18 ml.

Contiene perossido di idrogeno che agisce rilasciando ossigeno in grado di sgretolare meccanicamente il cerume in frammenti più piccoli che vengono poi rimossi più facilmente. Il prodotto può essere utile per prevenire la necessità di irrigazione dell'orecchio. In aggiunta al perossido di idrogeno, LinfoVir® Oto Cerume gocce auricolari contiene uno stabilizzante che, agendo da tampone, mantiene il pH su valori leggermente acidi, affini a quelli del condotto uditivo esterno.

### **Chi può utilizzare LinfoVir® Oto Cerume gocce auricolari**

Il prodotto è indicato a partire dai 3 anni di età.

### **Non usare LinfoVir® Oto Cerume gocce auricolari se:**

- Si è allergici al perossido di idrogeno;
- Si soffre di qualsiasi forma di otite (es.: dolore, infezione, secrezione);
- Si ha, o si sospetta di avere, la perforazione del timpano;
- Se è presente nell'orecchio il tubicino di drenaggio da timpanostomia;
- Se ci si è sottoposti di recente ad una operazione chirurgica dell'orecchio a meno di diversa indicazione da parte del medico.

### **Uso concomitante di LinfoVir® Oto Cerume gocce auricolari ed altri prodotti/farmaci**

Il prodotto non interferisce con altri prodotti o medicinali che potrebbero essere usati nello stesso momento tuttavia è buona norma non utilizzare altri prodotti otologici assieme al LinfoVir® Oto Cerume gocce auricolari. In caso di dubbio chiedere al proprio medico o farmacista.

### **Come usare LinfoVir® Oto Cerume gocce auricolari**

Prima dell'uso rimuovere qualsiasi apparecchio acustico eventualmente presente nell'orecchio. Al primo utilizzo del prodotto svitare il tappo di plastica fino a rompere il sigillo di garanzia.



- Tenere la testa inclinata da un lato per posizionare l'orecchio verso l'alto.
- Tirare delicatamente l'orecchio indietro ed in alto così da allineare il condotto uditivo esterno ed applicare le gocce. Mantenere la testa inclinata per almeno 2 minuti in modo che il prodotto possa agire.
- Girare poi la testa in direzione opposta per facilitare l'uscita del liquido in eccesso ed asciugare delicatamente l'orecchio con un panno pulito.

Richiudere accuratamente il flacone dopo l'uso e riporlo nel suo astuccio per una corretta conservazione.

### **Quanto LinfoVir® Oto Cerume gocce auricolari usare e per quanto tempo**

Seguire lo schema di somministrazione indicato nella tabella qui sotto a meno di diverse indicazioni da parte del medico.

I dosaggi variano a seconda che LinfoVir® Oto Cerume gocce auricolari venga usato per trattare accumuli di cerume già consolidati oppure in prevenzione.

ETÀ	DOSE	TAPPO di CERUME	PREVENZIONE
• Bambini dai 3 ai 9 anni	10 gocce	2 volte al giorno per 3-5 giorni	2 o 3 volte a settimana nel caso si ricorra alla rimozione del tappo di cerume 2 o 3 volte l'anno
• Bambini oltre i 9 anni • Adulti	16-20 gocce		

### Possibili effetti collaterali

Le persone che utilizzeranno questo prodotto non necessariamente andranno incontro agli effetti collaterali qui di seguito descritti o ad altri.

È stato riportato che le soluzioni otologiche possono talvolta causare fastidi, dolore, momentanea perdita dell'udito (dovuta alla presenza di liquido nel condotto uditivo esterno), vertigini, irritazione della pelle ed, in rari casi, anche prurito. Il rilascio di ossigeno può causare una temporanea sensazione di gorgogliamento. Nel caso doveste percepire un eccessivo fastidio, dolore, perdita della funzione uditiva o qualsiasi altro effetto collaterale non menzionato qui sopra, interrompere il trattamento e contattare il medico.

### Avvertenze e precauzioni

Consultare il medico nel caso il problema peggiori o non migliori entro un ragionevole lasso di tempo.

#### Solo per uso esterno. Usare esclusivamente nell'orecchio.

In caso di contatto accidentale con gli occhi, lavare immediatamente con abbondante acqua. Non ingerire. In caso di ingestione accidentale rivolgersi al più vicino Centro Antiveleno. Questo prodotto può macchiare i vestiti. Per l'uso nelle donne in gravidanza o allattamento sentire il parere del medico. Qualsiasi incidente grave che dovesse verificarsi a seguito dell'uso del dispositivo va comunicato al Fabbricante e all'Autorità competente.

### Conservazione del prodotto

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare ad una temperatura non superiore ai 30 °C. Conservare in posizione verticale. Non riempire nuovamente il flacone una volta consumate le gocce. Non congelare. Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione anche se il prodotto non è stato aperto. Usare entro 12 mesi dall'apertura.

### Composizione

Perossido di idrogeno al 3%; stabilizzante.



Verifica le disposizioni del tuo Comune

Distribuito da:  **NÓOS** Via Campello sul Clitunno, 34 - 00181 Roma  
[www.noosif.com](http://www.noosif.com)

 **Fabbricante:** Mitelos Bioscience S.L.,  
Parc Tecnològic del Vallès, Ronda de Can Fatjó 7-B, 08290  
Cerdanyola del Vallès. Barcellona, Spagna



Prodotto concesso in licenza da MITELOS BIOSCIENCE, S.L.

#### 1 Inquadra con lo smartphone il QR Code



#### 2 Scopri l'intera linea di prodotti Nóos



IMMUNITARIO



RESPIRATORIO



GASTROINTESTINALE



CAVO ORALE



UDITIVO