

InfoVir®

oto cerume spray auricolare

INFORMAZIONI PER IL CONSUMATORE

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Conservare questo foglio illustrativo perché potrebbe rendersi necessario leggerlo di nuovo. L'uso del prodotto è strettamente personale, LinfoVir® Oto Cerume spray auricolare non deve essere condiviso con altre persone.

Se avete bisogno di ulteriori informazioni o in caso di dubbio rivolgetevi al medico o al farmacista.

Cos'è e a che cosa serve

LinfoVir® Oto Cerume spray auricolare è stato scientificamente formulato per rimuovere gli accumuli di cerume dal condotto uditivo esterno e per aiutare a prevenirne l'eccessivo compattamento. Viene fornito in un flacone con erogatore spray da 45 ml.

Contiene perossido di idrogeno che agisce rilasciando ossigeno in grado di sgretolare meccanicamente il cerume in frammenti più piccoli che vengono poi rimossi più facilmente. Il prodotto può essere utile per prevenire la necessità di irrigazione dell'orecchio.

In aggiunta al perossido di idrogeno, LinfoVir® Oto Cerume spray auricolare contiene uno stabilizzante che, agendo da tampone, mantiene il pH su valori leggermente acidi, affini a quelli del condotto uditivo esterno.

Chi può utilizzare LinfoVir® Oto Cerume spray auricolare

Il prodotto è indicato negli adulti e nei bambini a partire dai 9 anni di età.

Non usare se:

- Si è allergici al perossido di idrogeno;
- Si soffre di qualsiasi forma di otite (es.: dolore, infezione, secrezione);
- Si ha, o si sospetta di avere, la perforazione del timpano;
- Se è presente nell'orecchio il tubicino di drenaggio da timpanostomia;
- Se ci si è sottoposti di recente ad una operazione chirurgica dell'orecchio a meno di diversa indicazione da parte del medico.

Uso concomitante con altri prodotti/farmaci

Il prodotto non interferisce con altri prodotti o medicinali che potrebbero essere usati nello stesso momento tuttavia è buona norma non utilizzare altri prodotti otologici assieme al LinfoVir® Oto Cerume spray auricolare. In caso di dubbio chiedere al proprio medico o farmacista.

Come usare

LinfoVir® Oto Cerume spray auricolare si applica usando l'erogatore spray appositamente disegnato per l'utilizzo nel canale uditivo esterno, come mostrato nelle figure qui sotto. Prima dell'uso rimuovere qualsiasi apparecchio acustico eventualmente presente nell'orecchio.

Al primo utilizzo inserire l'erogatore spray auricolare sul flacone esercitando una leggera pressione; spruzzare ripetutamente finché il liquido comincia a venir fuori.



- 1** • Inclinare la testa ed orientare l'orecchio verso l'alto tirandolo delicatamente all'indietro.



- 2** • Inserire il dispositivo nel condotto uditivo esterno e spruzzare il prodotto. Seguire le indicazioni di dosaggio indicate nella tabella di seguito riportata. Mantenere la testa inclinata per almeno 2 minuti in modo che il prodotto possa agire.

- 3** • Girare la testa in direzione opposta per facilitare l'uscita del liquido in eccesso ed asciugare delicatamente l'orecchio con un panno pulito.



- 4** • Sciacquare l'erogatore con acqua ed asciugarlo bene. Rimettere il prodotto nel suo astuccio per le successive applicazioni.

IMPORTANTE: prima di ogni utilizzo fare qualche erogazione a vuoto, finché il liquido non viene fuori e poi seguire le istruzioni (da 1 a 4).

Per una migliore conservazione riporre il flacone all'interno dell'astuccio.

Quanto LinfoVir® Oto Cerume spray auricolare usare e per quanto tempo

Seguire lo schema di somministrazione indicato nella tabella qui sotto a meno di diverse indicazioni da parte del medico.

I dosaggi variano a seconda che LinfoVir® Oto Cerume spray auricolare venga usato per trattare accumuli di cerume già consolidati oppure in prevenzione.

ETÀ	DOSE	TAPPO di CERUME	PREVENZIONE
• Bambini oltre i 9 anni • Adulti	4-5 puff	2 volte al giorno per 3-5 giorni	2 o 3 volte a settimana nel caso si ricorra alla rimozione del tappo di cerume 2 o 3 volte l'anno

Possibili effetti collaterali

Le persone che utilizzeranno questo prodotto non necessariamente andranno incontro agli effetti collaterali qui di seguito descritti o ad altri. È stato riportato che le soluzioni otologiche possono talvolta causare fastidi, dolore, momentanea perdita dell'udito (dovuta alla presenza di liquido nel condotto uditivo esterno), vertigini, irritazione della pelle ed, in rari casi, anche prurito. Il rilascio di ossigeno può causare una temporanea sensazione di gorgogliamento.

Nel caso doveste percepire un eccessivo fastidio, dolore, perdita della funzione uditiva o qualsiasi altro effetto collaterale non menzionato qui sopra, interrompere il trattamento e contattare il medico.

Avvertenze e precauzioni

Consultare il medico nel caso il problema peggiori o non migliori entro un ragionevole lasso di tempo.

Solo per uso esterno. Usare esclusivamente nell'orecchio. In caso di contatto accidentale con gli occhi, lavare immediatamente con abbondante acqua. Non ingerire. In caso di ingestione accidentale rivolgersi al più vicino Centro Antiveleeno. Questo prodotto può macchiare i vestiti. Per l'uso nelle donne in gravidanza o allattamento sentire il parere del medico. Qualsiasi incidente grave che dovesse verificarsi a seguito dell'uso del dispositivo va comunicato al Fabbricante e all'Autorità competente.

Conservazione del prodotto

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare ad una temperatura non superiore ai 30 °C. Conservare in posizione verticale.

Non riempire nuovamente il flacone una volta consumate le gocce. Non congelare. Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione/flacone anche se il prodotto non è stato aperto. Usare entro 12 mesi dall'apertura.

Composizione

Perossido di idrogeno al 3%; stabilizzante.



Verifica le disposizioni del tuo Comune

Distribuito da:  Via Campello sul Clitunno, 34 - 00181 Roma
www.noosit.com

 **Fabbricante:** Mitelos Bioscience S.L.,
Parc Tecnològic del Vallès, Ronda de Can Fatjó 7-B, 08290
Cerdanyola del Vallès. Barcellona, Spagna

Mitelos


Prodotto concesso in licenza da MITELOS BIOSCIENCE, S.L.

1 Inquadra con lo smartphone il QR Code



2 Scopri l'intera linea di prodotti Nóos



IMMUNITARIO



RESPIRATORIO



GASTROINTESTINALE



CAVO ORALE



UDITIVO