

Oracol[®] gel

DISPOSITIVO MEDICO

6 fialoidi da 3 ml

INDICAZIONI:

Dispositivo medico utile in caso di irritazioni ed infiammazioni del cavo orale. Aiuta a trovare sollievo dal dolore causato da lesioni delle mucose orali di varia origine: stomatiti, gengiviti, afte, traumi.

Forma una pellicola protettiva che, aderendo alla mucosa, isola la lesione dall'ambiente esterno e la mantiene in condizioni di pH ed umidità ideali per una più rapida riparazione.

DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE:

Applicare un sottile strato di gel sulla mucosa orale lesionata, eventualmente massaggiando con un tampone o con le dita asciutte e pulite, in modo da favorire una corretta ed uniforme distribuzione. Ripetere il trattamento almeno 2 volte al giorno dopo i pasti, avendo provveduto precedentemente ad una corretta igiene orale. Continuare le applicazioni fino alla scomparsa dei sintomi.

AVVERTENZE/PRECAUZIONI:

Dopo ogni applicazione si consiglia di non assumere cibi o bevande per evitare una anticipata rimozione del prodotto. Uso orale. Innocuo se ingerito accidentalmente. Si consiglia di non riutilizzare il fialoide se già aperto.

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

CONTROINDICAZIONI/EFFETTI INDESIDERATI:

Gli studi di biocompatibilità effettuati non hanno evidenziato controindicazioni o effetti indesiderati; tuttavia l'uso del prodotto è da evitarsi nei pazienti con una storia di ipersensibilità ad uno qualsiasi dei suoi componenti. In caso di dubbio consultare il medico prima di utilizzare il prodotto.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE:

Conservare a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore. La data di

scadenza indicata sui fialoidi si riferisce al prodotto integro correttamente conservato, non utilizzare il prodotto dopo tale data.

COMPOSIZIONE:

Aqua, Colostrum Whey, Xylitol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Cellulose Gum, PVP, Phenoxyethanol, Chondrus Crispus, Diazolidinyl Urea, Aroma, Sodium Dehydroacetate, Lactic Acid, Folic Acid

SENZA GLUTINE

CONFEZIONE:

Astuccio da 6 fialoidi da 3 ml

FABBRICANTE:

Difa Cooper Spa
Via Milano 160 - 21042 Caronno Pertusella (VA)

DISTRIBUITO DA:

NÓOS srl
Via Campello sul Clitunno, 34 - 00181 Roma
www.noosit.com

Ultima revisione delle istruzioni per l'uso: 13 luglio 2018

