

Oracol[®] *spray orale*

INFORMAZIONI PER IL CONSUMATORE

ORACOL Spray Orale è un dispositivo medico utile per la protezione e rigenerazione della mucosa del cavo orale affetta da traumi e irritazioni di varia origine. Contiene carragenina che crea un film invisibile sulla superficie della mucosa e delle gengive, isolandola dall'ambiente esterno e facilitando così il fisiologico processo rigenerativo tissutale.

INDICAZIONI

Utile in caso di irritazioni e infiammazioni del cavo orale e delle gengive. Aiuta a trovare sollievo dal dolore causato da lesioni delle mucose orali di varia origine: stomatiti, gengiviti, afte, traumi.

SENZA GLUTINE

MODO D'USO

Togliere il cappuccio protettivo dall'erogatore e direzionare quest'ultimo verso la zona da trattare all'interno della bocca. Spruzzare 2 o 3 volte il prodotto sulla mucosa orale affetta da irritazione per creare il film protettivo e ripetere l'applicazione 2 o più volte al giorno secondo necessità, preferibilmente la mattina e la sera, dopo i pasti e dopo accurata pulizia dentale. Continuare le applicazioni per almeno 2 settimane o fino alla scomparsa dei sintomi.

AVVERTENZE

Innocuo se ingerito accidentalmente.

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

L'uso del flacone è strettamente personale. Utilizzare il prodotto entro 15 giorni dalla prima apertura.

PRECAUZIONI

Dopo ogni applicazione si consiglia di non assumere cibi o bevande per circa 60 minuti per evitare un'anticipata rimozione del prodotto.

CONTROINDICAZIONI

Gli studi di biocompatibilità effettuati non hanno evidenziato controindicazioni, tuttavia l'uso del prodotto è da evitarsi nei pazienti con una storia di ipersensibilità a uno qualsiasi dei suoi componenti. In caso di dubbio consultare il medico prima di utilizzare il prodotto.

EFFETTI INDESIDERATI

Non sono stati evidenziati effetti indesiderati. Si consiglia di riferire direttamente al medico o al farmacista l'eventuale loro insorgenza attribuibile all'uso del prodotto.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore. La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto integro, correttamente conservato. Non utilizzare il prodotto dopo la scadenza. Avere cura di riposizionare il cappuccio sull'erogatore dopo ogni utilizzo.

NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO.

CONFEZIONE

Flacone da 15 ml completo di erogatore spray orale.

FABBRICANTE

Difa Cooper SpA
Via Milano 160 – 21042 Caronno Pertusella (VA)

DISTRIBUITO DA

NOOS srl
Via Campello sul Clitunno 34 – 00181 ROMA

Ultima revisione delle istruzioni per l'uso: 13 Luglio 2018

Dispositivo medico 