

# Proctoglu® plus

*crema proctologica*

---

## INFORMAZIONI PER IL CONSUMATORE

---

### INDICAZIONI D'USO

Proctoglu® plus è un dispositivo medico utilizzato per alleviare i sintomi associati a disturbi emorroidali, ragadi e proctiti (bruciore, prurito, sanguinamento, dolore). L'utilizzo di Proctoglu® plus risulta utile per ridurre la frizione durante l'evacuazione, alleviare bruciore, prurito e sanguinamento, prevenire infiammazione e congestione, ridurre il dolore e proteggere la mucosa del retto danneggiata, favorendone la guarigione.

### COME AGISCE

Proctoglu® plus, grazie alle sue proprietà lubrificanti ed idratanti, riduce la frizione durante l'evacuazione, favorisce l'espulsione delle feci, protegge la superficie ano-rettale infiammata ed irritata. Aiuta a prevenire l'irritazione e la congestione dell'area perianale, e dona sollievo da dolore, bruciore e prurito.

### INGREDIENTI

Vaselina, acqua depurata, olio di vaselina, alcol cetilstearylco, alcol stearylco, cefil(20)oe, glicerina, estratto idroglicerico di camomilla, fenossietanolo, betaglucano, allantoina, metilparabene, etilparabene, acido lattico, sodio idrato.

### CONFEZIONE

Il prodotto è disponibile in tubo da 30 ml ed è fornito insieme ad una cannula rettale.

La cannula è un dispositivo medico , con fabbricante: INGE S.p.A. - via Garibaldi 190, Garbagnate Milanese (MI)

### ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare la crema da 2 a 4 volte al giorno, preferibilmente prima e dopo ogni evacuazione. Lavare le mani prima e dopo ogni applicazione. Prima di applicare il prodotto, pulire l'area interessata. In occasione del primo utilizzo, svitare il tappo e girarlo dalla parte opposta, quindi premere per forare il sigillo di alluminio presente sulla bocca del tubo. Prelevare una piccola quantità di crema ed applicarla con le dita sulla zona perianale. Avvitare l'applicatore al posto del tappo. Premere il tubo finché dai fori della cannula non si vedrà fuoriuscire una piccola quantità di crema ed utilizzarla per lubrificare la cannula, spalmandola sulla sua superficie. Introdurre l'applicatore nell'ano. Premere quindi delicatamente sull'estremità del tubo in modo da distribuire la crema nell'area interessata. Estrarre l'applicatore.

Dopo l'uso, rimuovere immediatamente la cannula dal tubo e riposizionare il tappo. Pulire accuratamente la cannula con acqua e ricoprirla con l'apposito cappuccio.

### MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla luce e da fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Dopo l'apertura, utilizzare il prodotto entro 3 mesi.

## AVVERTENZE

Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Non utilizzare se la confezione risulta aperta o danneggiata. L'uso del prodotto e quello della cannula sono strettamente personali.

Non utilizzare nei bambini al di sotto dei 12 anni di età. Utilizzare in gravidanza e allattamento dopo aver consultato il medico.

Consultare il medico prima di utilizzare il prodotto, nel caso in cui ci sia la necessità di applicare altri prodotti ad uso endorettale o perianale. Non utilizzare la crema in caso di allergia o ipersensibilità ad uno o più ingredienti. In caso di effetti indesiderati, interrompere il trattamento e consultare il medico. Qualora non si dovesse notare alcun miglioramento dopo 2 settimane di trattamento, si consiglia di consultare il medico.

Data di ultima revisione: Gennaio 2020  
(IFU1\_01/20r0\_07/21)

Dispositivo medico  0373

 **Fabricante:** Biofarma  
Via Castelliere 2 - Mereto di Tomba (UD)

Distribuito da:

 **NOÓS**

Via Campello sul Clitunno, 34 - 00181 Roma  
[www.noosif.com](http://www.noosif.com)

**NÓOS PER L'AMBIENTE**

PAP 22

FOGLIETTO

Raccolta  
CARTA

Verifica le disposizioni del tuo Comune

### 1 Inquadra con lo smartphone il QR Code



### 2 Scopri l'intera linea di prodotti Nóos



IMMUNITARIO



RESPIRATORIO



GASTROINTESTINALE



CAVO ORALE



UDITIVO