

InfoVir[®] iperwash

INFORMAZIONI PER IL CONSUMATORE

InfoVir[®] iperwash è un dispositivo medico a base di soluzione salina ipertonica tamponata a pH 6, costituito da un sistema meccanico appositamente studiato per liberare ed igienizzare la cavità rinofaringea attraverso le narici, svolgendo un'azione osmotica e decongestionante.

INDICAZIONI

InfoVir[®] iperwash è una soluzione salina ipertonica utile in tutti quei casi di congestione rinofaringea e di flogosi delle cavità nasali con accumulo e ristagno di muco. Genera un'onda igienizzante in grado di pulire a fondo aiutando a ripristinare la pervietà delle vie aeree superiori e facilitando il respiro.


COMPOSIZIONE

Acqua depurata, sodio cloruro, potassio fosfato bibasico, potassio fosfato monobasico. Senza conservanti.

COME FUNZIONA

Il suo speciale terminale nasale consente la completa chiusura della narice producendo, alla pressione del soffiato, un'onda igienizzante in grado di raggiungere il rinofaringe e, attivando il riflesso palatale, uscire dalla narice controlaterale.

MODO D'USO

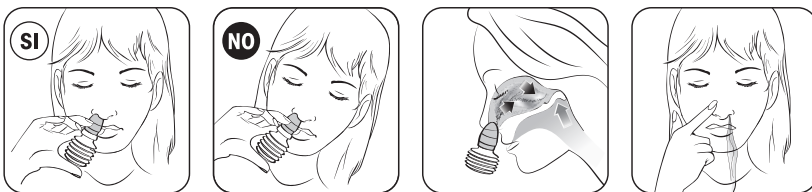

1. Prima di utilizzare il prodotto soffiare bene il naso.
2. Aprire un flacone e versare circa una metà del suo contenuto nel soffiato erogatore. Richiudere quindi il soffiato con il terminale nasale blu, spingendolo a fondo fino a farlo arrivare a contatto con la base della ghiera.
3. Appoggiare l'erogatore alla narice avendo cura di creare una perfetta aderenza che ne consenta la totale chiusura.
4. Premere fino in fondo il soffiato per erogare il prodotto.
5. Utilizzare la seconda metà della soluzione salina per effettuare il lavaggio attraverso l'altra narice.

COME E QUANDO USARLO

Utilizzare il prodotto due volte al giorno (mattina e sera), al bisogno o su consiglio del medico. Il singolo flacone monodose contiene una quantità di soluzione sufficiente per un lavaggio completo da entrambe le narici. Se si ritiene opportuno, tenere tra le mani il soffiato riscaldando leggermente la soluzione prima dell'erogazione.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo da fonti di calore. Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro correttamente conservato.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Per l'uso del prodotto nei bambini al di sotto dei 2 anni chiedere il parere del medico. Non utilizzare in pazienti con traumi alle orecchie. Non utilizzare in caso di accertata sensibilità verso i componenti della soluzione. L'uso dell'erogatore è strettamente personale. Utilizzare la soluzione solo per il trattamento delle vie aeree superiori; utilizzare l'erogatore solo con la soluzione in dotazione. Non iniettabile.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 erogatore a soffiato
- 1 terminale nasale blu morbido adattabile a tutte le narici
- 8 flaconi monodose di LinfoVir® iperwash soluzione salina ipertonica tamponata a pH 6

Ultima revisione delle istruzioni per l'uso: Maggio 2021



Via Campello sul Clitunno, 34 - 00181 Roma
www.noosit.com



Verifica le disposizioni del tuo Comune

1 Inquadra con lo smartphone il QR Code



2 Scopri l'intera linea di prodotti Nóos



IMMUNITARIO



RESPIRATORIO



GASTROINTESTINALE



CAVO ORALE



UDITIVO